

再使用禁止

ウェルドチューブ

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・ニッケル等の成分に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。
- ・使用状況により脱落。変形が起こる場合がある。その際はただちに歯科医師の診断を受けさせること。

【使用目的又は効果】

歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いること。

【使用方法等】

- ①本品を取りつける前に、部位・位置・方向を確認する。
- ②本品の裏面に汚れが付着していないことを確認し、バンドに溶接する。
- ③カラーコードを取り除き、ワイヤーを装着する。

【形状・構造及び原理等】

本品は、次の原材料で構成する。
・ステンレス鋼

(構造等)



【使用上の注意】*

- 1) 使用注意
 - ①患者の口腔内で使用する際には、口腔内を傷つけないように、取扱いには十分に注意すること。
 - ②万が一、変形や変質をしている製品がある場合には、使用せずに弊社まで連絡すること。
 - ③口腔内での脱落は誤飲・誤嚥につながる可能性があるため、施術の際は細心の注意を払って行うこと。また、診療後にも脱落があり得ることを患者に説明しておくこと。誤飲・誤嚥が起きたときは、ただちに適切な病院にかかるよう伝えておくこと。*
- 2) 重要な基本的注意
 - ①本品の使用により発疹等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売 : 株式会社バイオデント
電話番号 : 03-5604-0980
FAX番号 : 03-3801-7560
輸入先国名 : アメリカ合衆国
製造業者 : American Orthodontics
アメリカンオーソドンティックス