

ニッケルチタニウム スプリング

再使用禁止

【禁忌・禁止】**
 ・再使用禁止
 ・ニッケル等の成分に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。
 ・使用状況により脱落する場合がある。脱落した際は、ただちに歯科医師の診断を受けさせること。 **

【使用目的又は効果】*
 バネ状で矯正力を発生させるために用いること。

【使用方法等】
 「オープン型」
 メインアーチワイヤーに通しコイルを縮めた状態でコイル両端をストップチューブ等で留めて使用する。
 「クローズド型」
 コイルを伸ばした状態で、両端アイレットを他の矯正装置(フック等)に引っ掛けて使用する。

【形状・構造及び原理等】
 本品は、次の原材料で構成する。
 ・ニッケル、チタン

(構造等)



線径: .010 巻径: .030, .036



線径: .010 巻径: .030, .035, .045

(インチ)

オープン型



クローズド型

線径: .007, .010
巻径: .030 (インチ)

【使用上の注意】**
 1) 使用注意
 万が一、変形や変質をしている製品がある場合には、使用せずに弊社まで連絡すること。 **
 2) 重要な基本的注意
 ①本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
 ②口腔内での脱落は、誤飲・誤嚥につながる可能性があるため、施術の際は細心の注意を払って行うこと。また、診療後にも脱落があり得ることを患者に説明しておくこと。誤飲・誤嚥が起きたときは、ただちに適切な病院にかかるよう伝えておくこと。 **

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
 製造販売 : 株式会社バイオデント
 電話番号 : 03-5604-0980
 FAX番号 : 03-3801-7560
 輸入先国名 : アメリカ合衆国
 製造業者 : American Orthodontics
 アメリカンオーソドンティックス

オープン型	
コードNo.	バネ力 (gf)
855-173	25
855-173C	25
855-174	50
855-170C	50
855-174C	50
855-171C	40
855-175	75
855-175C	75

クローズド型	
コードNo.	バネ力 (gf)
855-184	50
855-186	50
855-180	100
855-181	100
855-179	100
855-185	125
855-187	125