

機械器具58整形用機械器具

一般医療機器 歯列矯正用位置測定器具 (70733000)

PLASガイド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造等〕

** 1. 形状



2. 材質・組成

PET

【使用目的又は効果】

歯科矯正治療において、歯科矯正用アンカースクリュー等から成る歯列矯正装置を、正しい位置に装着する為に用いる器具である。

【使用方法等】

1. 使用に先立って消毒用エタノールによる清拭を行い、付着した残存物等を取り除く。
2. 通法に従い操作する。
3. 【使用上の注意】及び【保管方法及び有効期間等】に従う。

【使用上の注意】

〈重要な基本的事項〉

1. 本品を用いた処置により発疹、皮膚炎等の過敏症状又はアレルギー反応症状が現れた患者には、使用を中止し医師の診断を受けさせること。
2. 破折等による誤飲の恐れがある為、以下は行わないこと。
 - ①本品に対する曲げ・切削・加圧等。
 - ②粗雑な扱い。(キズをつける・落下させる・強い衝撃を与える等)
 - ③バーナ等による加熱。
3. 薬液等が付着した場合、劣化するおそれがある為、速やかに清拭すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管の方法〉

・保管の条件

1. 高温・多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。
2. 変形の原因となるので、トレー・コンテナによる移動及び保管は丁寧に行うこと。なお、トレーやコンテナを使用する際は重い器具を乗せないこと。

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検事項(日常点検)〉

1. 使用に先立って消毒用エタノールによる清拭等を行うこと。
2. 使用前に汚れ、破損、ヒビ、キズ、劣化等がないか点検すること。

〈注意事項〉

1. オートクレーブ滅菌は、本品を劣化させるので行わないこと。
2. プラズマ滅菌は、素材に影響を及ぼすので行わないこと。
3. 紫外線滅菌は、素材に影響を及ぼすので行わないこと。
4. 劣化等の原因となるので、磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名 : 株式会社YDM
: 〒355-0042
住所 : 埼玉県東松山市今泉28
電話番号 : 0493-24-3388
ファックス : 0493-24-0703
ホームページ : <http://www.ydm.co.jp/>

販売元(問い合わせ窓口)

株式会社バイオデント

東京都荒川区西日暮里2丁目33番19号

電話番号 : 03-5604-0980

ファックス : 03-3801-7560