

PLAS ガイド II 使用方法

PLAS ガイドが新しくなりました！



PLAS (パラタル・レバー・アーム・システム) を使用する際、ISA Advance の植立位置を正しくマーキングするためのガイドです。


PLAS ガイド II No.B35-216

PLAS を使用する際は口蓋正中縫合から 1~2mm ずらし、従来よりやや近心側にアンカーを植立することで成功率が上がると報告されています。

1 ポジショニングラインを口蓋正中縫合部及び 6 番遠心部に合わせてセットします


PLAS ガイド II を口蓋正中縫合部及び 6 番遠心部に合わせることで、口蓋正中縫合部から 1.5mm の位置に植立部位をマーキングすることができます。2 級関係が強い方に植立することで PLAS で牽引する際にアームのたわみが少なくなります。

左側の 2 級が強い場合

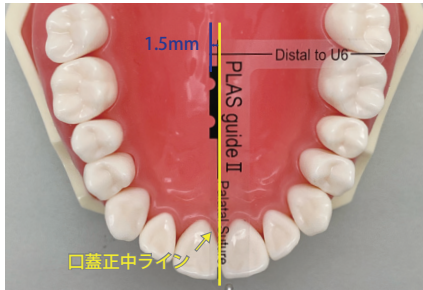

PLAS ガイドの表側を使用

右側の 2 級が強い場合

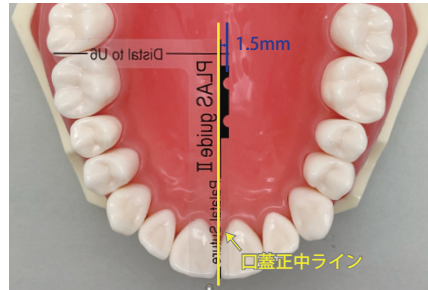

PLAS ガイドの裏側を使用



Check Point !

持針器等を使用して口腔内にセットすると便利です。

2 外科用マーカ等でスクリー植立位置を印記します



PLASガイドII使用方法



弊社 HP でも
使用方法をご覧になれます



～美しい歯ならびを創造する～

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 2-33-19YDM 日暮里ビル

TEL 03-5604-0980/FAX 03-3801-7560 URL <http://biodent.co.jp> Email info@biodent.co.jp

一般 届出番号 11B1X1000658D605



0120-49-0980

※携帯・PHSからもご利用になれます。

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください